# Rehabilitación con implantes dentales

Una rehabilitación con implantes dentales es un tratamiento que permite reemplazar uno o más dientes perdidos.

Un implante dental es un producto sanitario diseñado para sustituir la raíz que falta y mantener el diente artificial en su sitio. Se trata de una pequeña pieza de titanio, material biocompatible<sup>1</sup>, que cicatriza en el hueso y se osteointegra<sup>2</sup>. Sobre el implante colocamos la prótesis<sup>3</sup> que se compone de un pilar<sup>4</sup> que permite y asegura un ajuste perfecto con la corona<sup>5</sup> de cerámica.



### 1 Biocompatible:

Capacidad de algunos materiales para adaptarse y ser aceptados por el organismo.



Proceso por el cual las células óseas se adhieren a la superficie de un implante. El material más conocido es el titanio.



Sustituto de una o varias piezas dentales perdidas. El material puede ser: metal, polímero o cerámico.

### 4 Pilar:

Elemento donde se ajustará la prótesis. Es la conexión entre la prótesis y el implante.

#### 5 Corona:

Prótesis dental que sustituye completamente la función del diente o dientes naturales perdidos.

## Phibo® es la respuesta

### ¿Quiénes pueden llevar implantes dentales?

Los implantes dentales están indicados para aquellas personas que hayan perdido uno o varios dientes debido a problemas diversos.

### ¿Mejorará mi calidad de vida con los implantes?

Ganará en seguridad y confianza, podrá volver a reír con total despreocupación con una boca estética y funcional, y podrá masticar sin miedo. Recuperará también su fonética con la restauración de sus dientes, se encontrará de nuevo con el placer de sonreír. Los resultados le sorprenderán.

### ¿Los dientes serán duraderos y naturales?

Siguiendo los cuidados y revisiones periódicas de su dentista, la durabilidad de los implantes podría llegar a ser la misma que la de sus dientes naturales.

### ¿La colocación de los implantes es doloroso?

No. El dolor no existe ni en la preparación ni en la colocación del implante. Tan solo puede existir alguna molestia o incomodidad que será aliviada por su doctor. Se utiliza anestesia local común, y ni durante la cirugía ni el post operatorio hay más molestias que en una extracción normal.

#### ¿Qué cuidados debo tener después de la colocación del implante?

Debe tener los cuidados regulares como si se tratara de sus dientes naturales siguiendo las recomendaciones de su doctor. Solicite a su doctor el programa de Cuidados y recomendaciones postoperatorio Phibo®.

Cada paciente debe someterse a un diagnóstico clínico exhaustivo antes de la realización de cualquier tratamiento con implantes dentales. Serán necesarias una serie de pruebas diagnósticas, como un estudio radiográfico y un análisis clínico completo.



### Phibo® HQ

Pol. Ind. Mas d'en Cisa Gato Pérez, 3-9 08181 Sentmenat, Spain T: +34 937 151 958 F: +34 937 153 997



X

phibo<sup>φ</sup>

www.phibo.com



# Implantes dentales

La solución más natural, estética y segura



### Sonría naturalmente

## Los implantes dentales son tan reales como un diente.


Podrá volver a hablar, reír o comer con seguridad, sentirse totalmente libre, cómodo y seguro.

Los implantes dentales contribuyen a la estimulación del hueso y las encías favoreciendo la salud bucodental. Mantienen y recuperan la expresión facial y fonética.

### La solución definitiva

# Fiables, duraderos, seguros, estéticos y funcionales.

Después de años de exhaustiva investigación, los implantes dentales son un método seguro y fiable, utilizado por millones de personas en todo el mundo, que disfrutan de los beneficios de los implantes dentales desde hace más de 40 años.

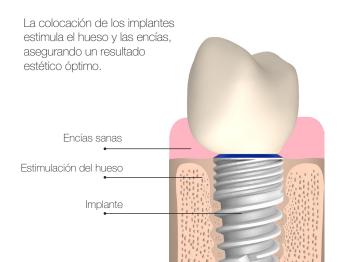

# Adaptado a sus necesidades

### Porque cada paciente es único.

La solución idónea para cada paciente, de la forma más sencilla y natural. Las rehabilitaciones con implantes dentales ofrecen tratamientos personalizados ya que permiten adaptarse a las necesidades específicas de cada paciente.

#### La sustitución de un solo diente.

Una corona colocada en un implante, ya sea en el maxilar superior o el inferior.



### Sustitución de varios dientes.

Coronas individuales sobre implantes o un puente fijo adaptado a dos o más implantes.



### Sustitución de todos los dientes.

Los implantes dentales son una de las soluciones para la restauración dental, ya sea en maxilar superior o inferior, existiendo distintas opciones: un puente fijo adaptado a varios implantes o una prótesis desmontable ajustada mediante dispositivos de anclaje a implantes dentales.



### Elija Phibo®

# La tranquilidad de confiar en productos de vanguardia.

Phibo®, líder en soluciones odontológicas globales, es la primera compañía multinacional española en la que confían más profesionales.

Porque es una compañía basada en la ciencia y la tecnología, desarrollando soluciones de vanguardia y productos innovadores para que sonría seguro y con confianza.

Porque nuestros implantes son el resultado de una extensa labor de investigación y datos clínicos, que proporcionan la certeza de obtener los mejores resultados.

Porque Phibo® garantiza la calidad y fiabilidad de sus productos, basándose en unos procesos productivos altamente controlados mediante exigentes procesos de validación y verificación.

Porque Phibo® ayuda a los médicos estomatólogos y dentistas en su ejercicio profesional y a los pacientes a mejorar su calidad de vida.

Esta clínica utiliza implantes y componentes Philoo®. Exija productos originales, de calidad y certificados.



